

# GEBRAUCHSANLEITUNG (Variante 1)

## Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres *peniXtend*®!

Der *peniXtend*® ist ein erprobtes technisches Gerät zur Vergrößerung des männlichen Gliedes durch langzeitige Dehnungsbehandlung. Es revolutioniert herkömmliche sich auf dem Markt befindliche Systeme durch seine innovative Geflechtkondomtechnologie, ein verblüffend einfaches Handling sowie einen exzellenten Tragekomfort.


### Anwendungsgebiete:


Der *peniXtend*® empfiehlt sich für den Einsatz bei:

- Wunsch nach Penisverlängerung bzw. Penisvergrößerung
- genetischer oder erworbener Penisdeviation (Penisverkrümmung)
- durchblutungsbedingter erektiler Dysfunktion und/oder Impotenz
- Training der sexuellen Funktion nach Prostata-OP
- Wunsch nach mehr sexueller Vitalität und Ausdauer

### Inhalt der Packung:


- A 1 x Zuggurt
- B 3 x Extender (Geflechtskondom mit Verbindungselement) in verschiedenen Größen (S/M/L)
- C Trichterförmige Öffnung
- D Befestigungselement, äußerer Geflechtskondom
- E Verbindungselement am inneren Geflechtskondom
- F Schubring

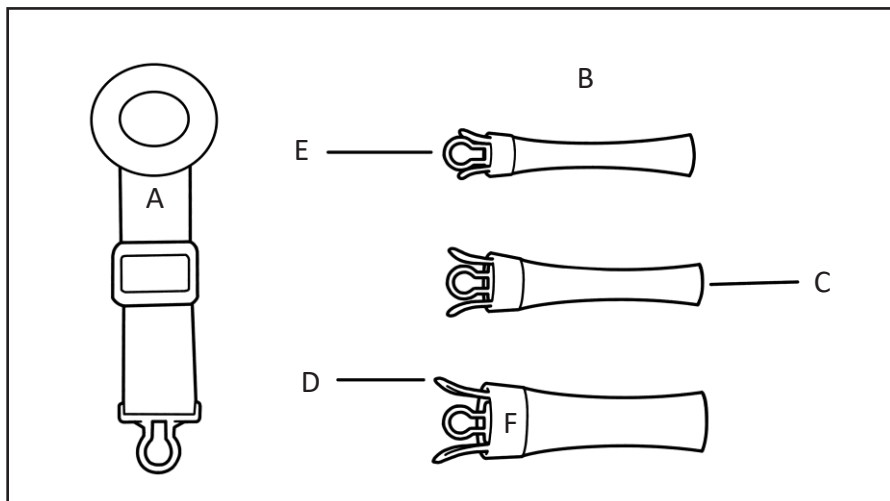

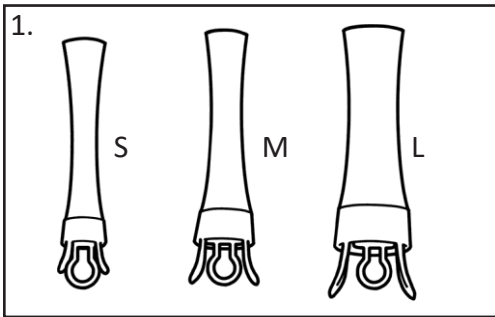


**Anleitung:**


1. Nehmen Sie die Bestandteile Ihres *peniXtend*<sup>®</sup> aus der Packung. Wählen Sie die für Sie geeignete Größe (S/M/L) aus.

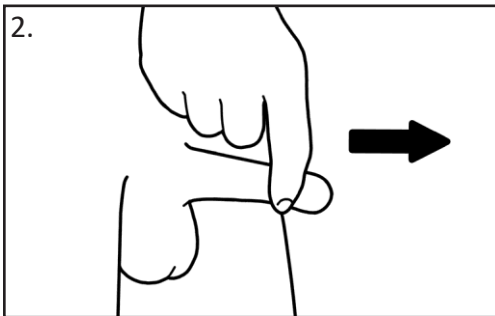

2. Halten Sie Ihre Eichel mit der Hand und ziehen Sie sie für ca. 10 Sekunden vom Körper weg, sodass der Penis sich ausdehnt.

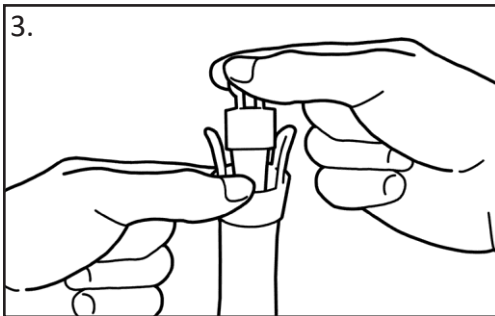


3. Halten Sie den *peniXtend*<sup>®</sup> mit einer Hand am inneren Verbindungselement und mit der anderen Hand am Schubring. Der Schubring am Ende des äußeren Abschnitts des Geflechtkondoms unterstützt Sie sowohl beim Fixieren als auch später beim Entfernen des Geflechtkondoms vom Penis.

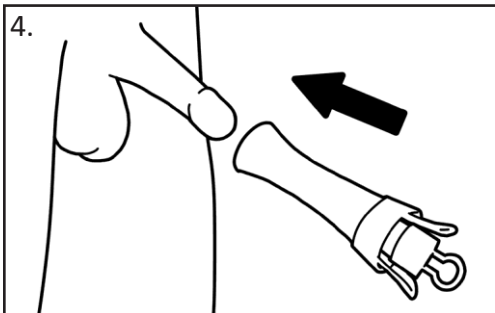


4. Setzen Sie Ihren Penis mit der Eichel in den trichterförmigen, ein wenig erweiterten Bereich des Geflechtkondoms und drücken Sie das *peniXtend*<sup>®</sup> sehr leicht gegen Ihren Penis.

Stülpen Sie nun den Geflechtkondom durch einfaches Schieben über Ihren Penis. Auf diese Weise wird der Penis nach und nach vollständig im Geflechtkondom aufgenommen.


**5.** Schieben Sie den Ring des Zuggurts über Ihren Penis.

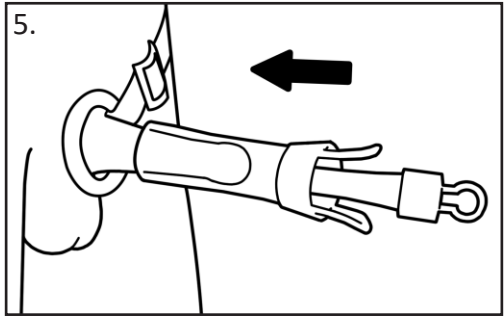


**6.** Zum Druckaufbau am peniXtend® nutzen Sie das Verbindungselement am inneren Abschnitt des Geflechtcondoms, indem Sie es mit dem Verbindungsteil des Zuggurts verbinden.

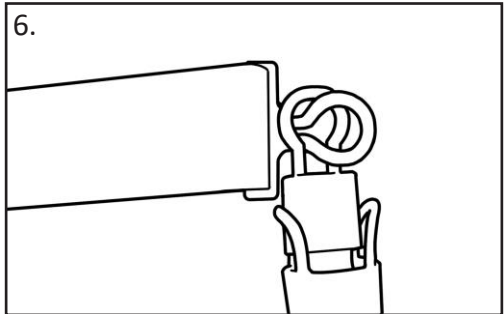

**7.** Legen Sie den Zuggurt um Ihren unteren Rücken und die Hüften und koppeln Sie das Verbindungselement des Gurtes mit dem Verbindungselement des Geflechtcondoms. Achten Sie sowohl auf bequemen Sitz durch Justieren des Gurtes als auch auf den ausgeübten Druck durch Verschieben des Gurtes.

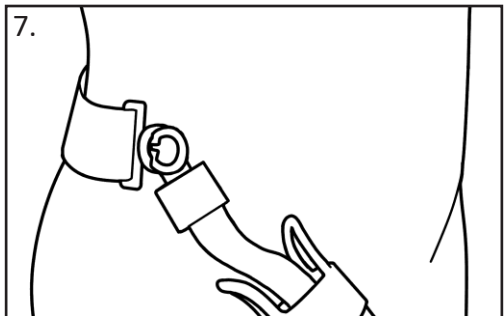

**8.** Ziehen Sie Ihre Unterhose an. Der peniXtend® ist jetzt von außen unsichtbar, trägt nicht auf und lässt sich pro Tag bis zu zwölf Stunden bedenkenfrei und komfortabel tragen.

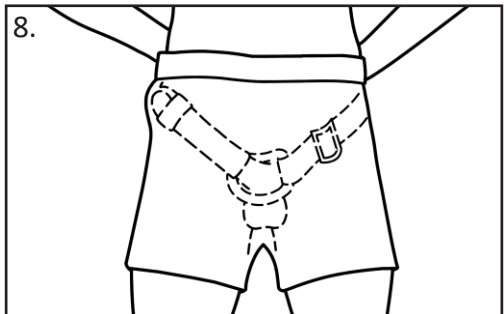

## Vorsichtsmaßnahmen und unerwünschte Wirkungen:

Die Anwendung des peniXtend® erfolgt auf eigene Gefahr, ist aber bei Einsatz und Gebrauch gemäß Anleitung unbedenklich. Für etwaige Schäden, die durch nicht sachgemäßen Gebrauch oder Nichtbefolgung der Sicherheits- und Warnhinweise entstehen, übernimmt der Hersteller keine Verantwortung.

peniXtend® ist ein Wellnessgerät und für die Nutzung durch Erwachsene vorgesehen. Es ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Die Weitergabe des Geräts an Dritte wird aus Hygienegründen nicht empfohlen, um die Ansteckungsgefahr bei etwaigen Krankheiten zu vermeiden. Erkrankte, infizierte oder gereizte Hautstellen eignen sich nicht für die Verwendung von peniXtend®. Zur regelmäßigen Reinigung Ihres peniXtend® empfiehlt sich lauwarmes Wasser, im Bedarfsfall auch Seifenlauge.

Erfahrungsgemäß führt eine regelmäßig durchgeführte, länger andauernde Dehnung mit geringerer Zugkraft zu besseren Ergebnissen als kurze, intensive Dehnphasen mit übermäßigem, evtl. sogar Schmerzen verursachendem Strecken. Bitte justieren Sie daher die Spannung nicht zu straff. Für den Fall, dass aufgrund zu starker Straffung Durchblutungsstörungen am Penis auftreten, sollten Sie mit der Anwendung des peniXtend® für einen Tag aussetzen. Probieren Sie so lange verschiedene Spannungsgrade aus, bis Sie eine optimale Einstellung des Gerätes erreicht haben.

Gleichermaßen wichtig wie eine regelmäßige Anwendung des peniXtend® ist das Einhalten ausreichender Ruhephasen. Der Grund liegt darin, dass die sich die Wirkung – nämlich die Penisverlängerung – in eben diesen Ruhe- bzw. Wachstumsphasen einstellt, und nicht während der Dehnung selbst. Da nachts spontane Erektionen auftreten können, raten wir während des Schlafs vom Gebrauch des peniXtend® und empfehlen Ihnen, diese Zeit als Ruhephase zu nutzen.

Sowohl die Befestigungsvorrichtung als auch das Geflechtsskondom sind aus einem Material fabriziert, das sowohl für Allergiker als auch für Diabetiker geeignet ist. Sollten unerwarteter Weise dennoch Reizungen oder allergische Reaktionen auftreten, brechen Sie die Anwendung des peniXtend® sofort ab. Zu Risiken in dieser Hinsicht wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen, schmerzstillenden Medikamenten oder Schlaf- und Beruhigungsmitteln darf das Gerät nicht angewandt werden. Grund dafür ist, dass hiervon Ihr natürliches und persönliches Schmerzempfinden beeinträchtigt sein kann und Sie eventuell nicht zeitnah und angemessen reagieren können, um Schädigungen zu verhindern.

Auf den beiden letzten Seiten dieser Beschreibung finden Sie eine Tabelle zu Ihrer Unterstützung. Damit behalten Sie permanent die Kontrolle und Übersicht über den Verlauf der Anwendung und den Wachstumsfortschritt Ihres Penis.

Viel Erfolg und viel Spaß nun beim Einsatz Ihres peniXtend®!

Weitere Informationen erhalten Sie auf  
[www.peniXtend.com](http://www.peniXtend.com)

Ihr peniXtend®-Team



# GEBRAUCHSANLEITUNG (Variante 2)

## Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres *peniXtend*®!

Der *peniXtend*® ist ein erprobtes technisches Gerät zur Vergrößerung des männlichen Gliedes durch langzeitige Dehnungsbehandlung. Es revolutioniert herkömmliche sich auf dem Markt befindliche Systeme durch seine innovative Geflecht kondomtechnologie, ein verblüffend einfaches Handling sowie einen exzellenten Tragekomfort.


### Anwendungsgebiete:


Der *peniXtend*® empfiehlt sich für den Einsatz bei:

- Wunsch nach Penisverlängerung bzw. Penisvergrößerung
- genetischer oder erworbener Penisdeviation (Penisverkrümmung)
- durchblutungsbedingter erektiler Dysfunktion und/oder Impotenz
- Training der sexuellen Funktion nach Prostata-OP
- Wunsch nach mehr sexueller Vitalität und Ausdauer

### Inhalt der Packung:


- A 1 x Zuggurt
- B 3 x Extender (Geflecht kondom mit Verbindungselement) in verschiedenen Größen (S/M/L)
- C Trichterförmige Öffnung
- D Befestigungselement, äußerer Geflecht kondom
- E Verbindungselement am inneren Geflecht kondom
- F Schubring

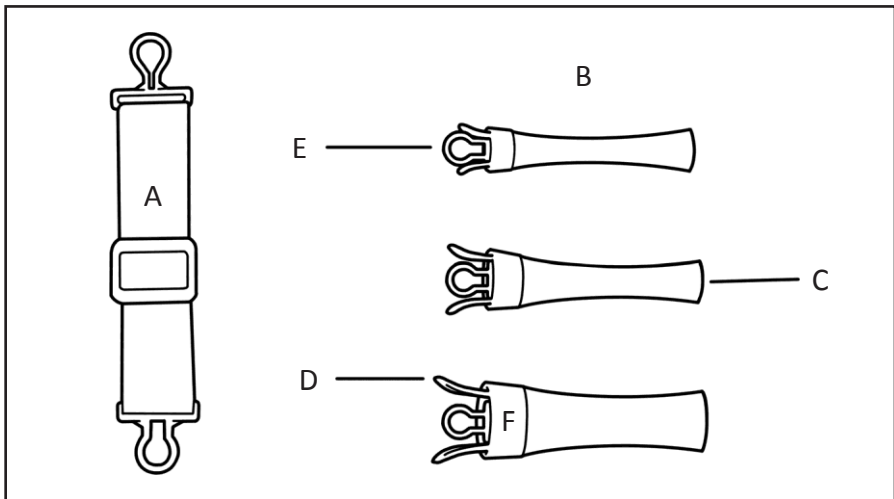

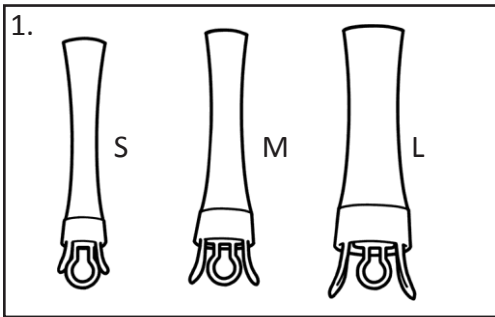


**Anleitung:**


1. Nehmen Sie die Bestandteile Ihres *peniXtend*® aus der Packung. Wählen Sie die für Sie geeignete Größe (S/M/L) aus.

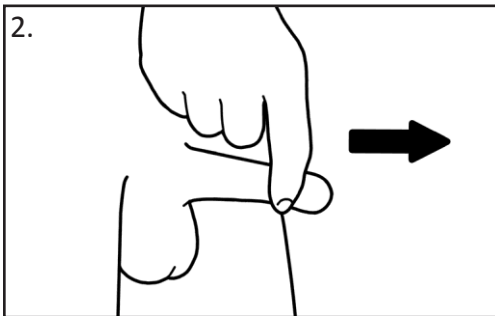

2. Halten Sie Ihre Eichel mit der Hand und ziehen Sie sie für ca. 10 Sekunden vom Körper weg, sodass der Penis sich ausdehnt.

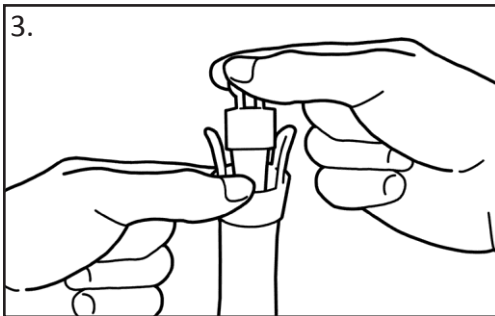


3. Halten Sie den *peniXtend*® mit einer Hand am inneren Verbindungselement und mit der anderen Hand am Schubring.

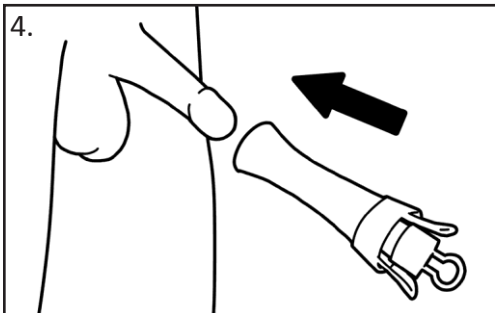


4. Setzen Sie Ihren Penis mit der Eichel in den trichterförmigen, ein wenig erweiterten Bereich des Geflecht-kondoms und drücken Sie das *peniXtend*® sehr leicht gegen Ihren Penis.


**5.** Stülpen Sie nun den Geflecht kondom durch einfaches Schieben über Ihren Penis. Auf diese Weise wird der Penis nach und nach vollständig im Geflecht kondom aufgenommen. Der Schubring am Ende des äußeren Abschnitts des Geflecht kondoms unterstützt Sie sowohl beim Fixieren als auch später beim Entfernen des Geflecht kondoms vom Penis.

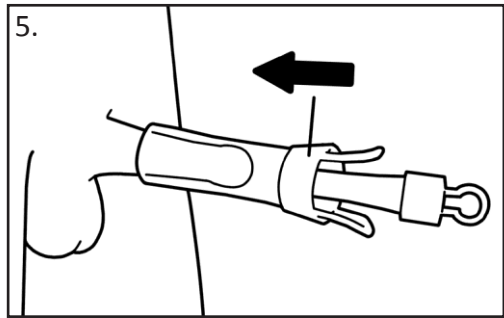


**6.** Zum Druckaufbau am *peniXtend*<sup>®</sup> nutzen Sie das Verbindungselement am inneren Abschnitt des Geflecht kondoms, indem Sie es mit dem Zuggurt verbinden.

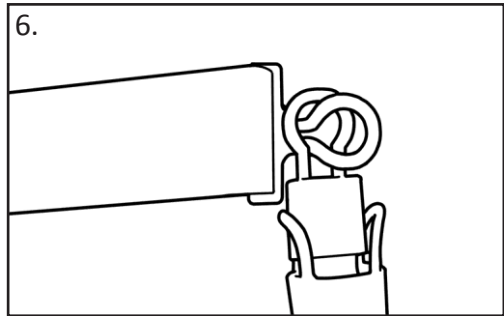

**7.** Legen Sie anschließend den Zuggurt um Ihren unteren Rücken und die Hüften und koppeln Sie das Verbindungselement wie einen Gurt mit sich selbst. Achten Sie sowohl auf bequemen Sitz durch Justieren des Gurtes als auch auf den ausgeübten Druck durch Verschieben des Gurtes.

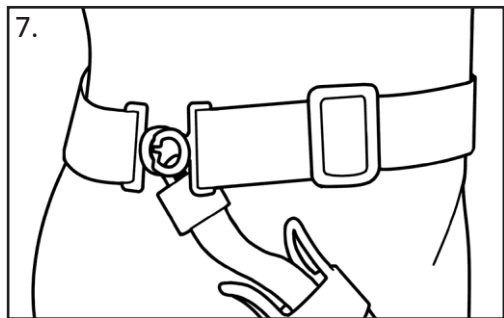

**8.** Ziehen Sie Ihre Unterhose an. Der *peniXtend*<sup>®</sup> ist jetzt von außen unsichtbar, trägt nicht auf und lässt sich pro Tag bis zu zwölf Stunden bedenkenfrei und komfortabel tragen.

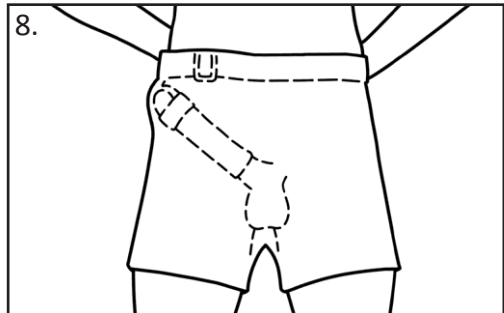

## Vorsichtsmaßnahmen und unerwünschte Wirkungen:

Die Anwendung des peniXtend® erfolgt auf eigene Gefahr, ist aber bei Einsatz und Gebrauch gemäß Anleitung unbedenklich. Für etwaige Schäden, die durch nicht sachgemäßen Gebrauch oder Nichtbefolgung der Sicherheits- und Warnhinweise entstehen, übernimmt der Hersteller keine Verantwortung.

peniXtend® ist ein Wellnessgerät und für die Nutzung durch Erwachsene vorgesehen. Es ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Die Weitergabe des Geräts an Dritte wird aus Hygienegründen nicht empfohlen, um die Ansteckungsgefahr bei etwaigen Krankheiten zu vermeiden. Erkrankte, infizierte oder gereizte Hautstellen eignen sich nicht für die Verwendung von peniXtend®. Zur regelmäßigen Reinigung Ihres peniXtend® empfiehlt sich lauwarmes Wasser, im Bedarfsfall auch Seifenlauge.

Erfahrungsgemäß führt eine regelmäßig durchgeführte, länger andauernde Dehnung mit geringerer Zugkraft zu besseren Ergebnissen als kurze, intensive Dehnphasen mit übermäßigem, evtl. sogar Schmerzen verursachendem Strecken. Bitte justieren Sie daher die Spannung nicht zu straff. Für den Fall, dass aufgrund zu starker Straffung Durchblutungsstörungen am Penis auftreten, sollten Sie mit der Anwendung des peniXtend® für einen Tag aussetzen. Probieren Sie so lange verschiedene Spannungsgrade aus, bis Sie eine optimale Einstellung des Gerätes erreicht haben.

Gleichermaßen wichtig wie eine regelmäßige Anwendung des peniXtend® ist das Einhalten ausreichender Ruhephasen. Der Grund liegt darin, dass die sich die Wirkung – nämlich die Penisverlängerung – in eben diesen Ruhe- bzw. Wachstumsphasen einstellt, und nicht während der Dehnung selbst. Da nachts spontane Erektionen auftreten können, raten wir während des Schlafs vom Gebrauch des peniXtend® und empfehlen Ihnen, diese Zeit als Ruhephase zu nutzen.

Sowohl die Befestigungsvorrichtung als auch das Geflechtst kondom sind aus einem Material gefertigt, das sowohl für Allergiker als auch für Diabetiker geeignet ist. Sollten unerwarteter Weise dennoch Reizungen oder allergische Reaktionen auftreten, brechen Sie die Anwendung des peniXtend® sofort ab. Zu Risiken in dieser Hinsicht wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen, schmerzstillenden Medikamenten oder Schlaf- und Beruhigungsmitteln darf das Gerät nicht angewandt werden. Grund dafür ist, dass hiervon Ihr natürliches und persönliches Schmerzempfinden beeinträchtigt sein kann und Sie eventuell nicht zeitnah und angemessen reagieren können, um Schädigungen zu verhindern.

Auf den beiden letzten Seiten dieser Beschreibung finden Sie eine Tabelle zu Ihrer Unterstützung. Damit behalten Sie permanent die Kontrolle und Übersicht über den Verlauf der Anwendung und den Wachstumsfortschritt Ihres Penis.

Viel Erfolg und viel Spaß nun beim Einsatz Ihres peniXtend®!

Weitere Informationen erhalten Sie auf [www.peniXtend.com](http://www.peniXtend.com)

Ihr peniXtend®-Team

